




ZIP C combina tecniche di produzione e design avanzati, offrendo prestazioni eccezionali in termini di controllo della rotazione, basso frizionamento e facilità di utilizzo. La ceramica pura e ad alta densità

garantisce alta resistenza ed estetica, così come richiesto dai pazienti più esigenti. Il profilo liscio ed arrotondato ed i ganci ergonomici consentono un elevato comfort per il paziente. Inoltre, ciò che distingue questo bracket dagli altri dispositivi auto-leganti è la clip in nichel-titanio con rivestimento in Rodio. L'eccezionale caratteristica di memoria di forma del Nickel-Titanio ne garantisce un funzionamento affidabile, senza il rischio di deformazioni durante l'intera durata del trattamento; il rivestimento in Rodio ne ottimizza l'estetica.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Il design con **gancio arrotondato** permette un maggiore comfort per il paziente

2. La basetta con design a **tripla X** incrementa l'affidabilità della ritenzione

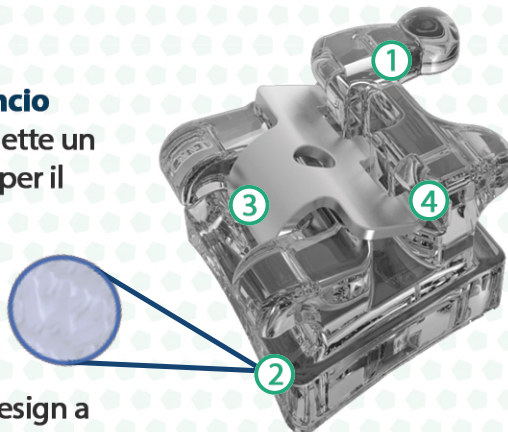

3. La clip è integralmente **realizzata in nichel-titanio**

4. Il **meccanismo a tre incastri** previene il movimento mesio-distale dell'arco

CONTROLLO DINAMICO

Fase Passiva. Gli archi iniziali non frizionano facilitando il livellamento e l'allineamento in modo efficiente.

Fase Interattiva. Gli archi rettangolari intermedi riempiono lo slot senza saturarlo per un'affidabile chiusura degli spazi, un perfetto controllo della rotazione e l'espressione della forma dell'arcata.

Fase Attiva. Archi rettangolari finali, estendendosi oltre lo slot, ingaggiano completamente la clip facilitando il controllo attivo per la fase di finitura.



FUNZIONAMENTO SEMPLICE



APERTURA. Facile apertura della clip con qualsiasi strumento per consentire rapidità nelle operazioni di cambio degli archi. Posizionare lo strumento sulla coda del clip e spingerlo verso lo slot quindi, fare scorrere la clip verso il lato occlusale per aprirla completamente.



CHIUSURA. La clip si chiude facilmente con una semplice pressione delle dita.